



## Návod pro sejmutí odlitku pro výrobu celkové protézy

### Obsah sady:

počet ks	název
<b>S-4/M-5/L-7/XL-9</b>	fixační obvaz - Měkká fixace
1	Obvaz hadicový (punčocha)
1	Ochrana proti proříznutí (elastický pásek)
1 set	gumové rukavice
1	nůž
1	přepravní štítek (nalepovací)
1	tento návod

### Příprava

Než začnete s odebíráním odlitku přečtěte si pečlivě tento návod, návody obsažené v balení zdravotnických prostředků, případně se podívejte na instruktážní video na našich stránkách.



<https://eshop.pet2me.eu/produkt/celkova-proteza-pawsthesis-pro-psa/>

**Pro úspěšné odebrání otisku budou potřeba minimálně 2 osoby. Pro zvláště živé psy je výhodou pomoc i třetí osoby.**

Vybalte prosím veškerý obsah z odlitkové sady a zkontrolujte úplnost na základě výše uvedeného seznamu. Rozložte na podlahu ručník nebo jinou textilní podložku, která se smí ušpinit, a položte vedle ní veškeré náčiní. Připravte si misku s vlažnou vodou, nůžky a metr.

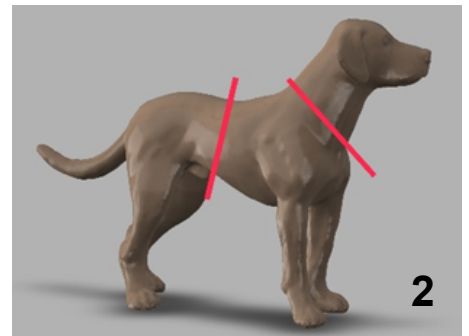
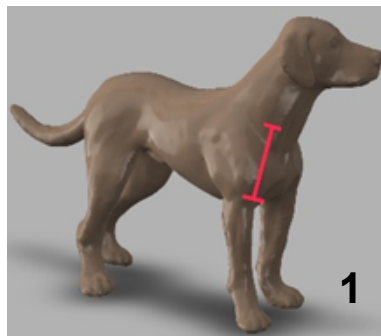
### Zřeknutí se odpovědnosti

Použití této sady a materiálů v ní obsažených je na vaše vlastní riziko. Pokud použijete dodanou sadu, společnost **Pawsthesis ani WERFFT, spol s r.o. nenesou odpovědnost za případné škody a nároky vyplývající z použití odlitkové sady vámi nebo třetími stranami. Pokud si nejste jisti, jak se sadou zacházet, kontaktujte nás.**

<b>Výrobce:</b> 	<b>Prodejce ČR:</b> 		
Simon Schuß a Dominik Hogen GbR V 1.0 Pater-Alfred-Maier Str. 7 86316 Friedberg Německo	Webová stránka: <a href="http://www.pawsthesis.de">www.pawsthesis.de</a> E-mailem: <a href="mailto:kontakt@pawsthesis.de">kontakt@pawsthesis.de</a> Telefon: +49 821 2674557	WERFFT, spol s r.o. Kotlářská 53 602 00 Brno Česká republika	Webová stránka: <a href="http://www.eshop.pet2me.eu">www.eshop.pet2me.eu</a> E-mailem: <a href="mailto:eshop.pet2me@werfft.cz">eshop.pet2me@werfft.cz</a> Telefon: +420 541 212 183



# Sejmutí otisku

1. Pomocí svinovacího metru změřte vzdálenost mezi spodní částí krku a přední nohy (**viz obrázek 1**).
2. Nůžkami prostříhnete punčochovou pleteninu v příčném směru v délce asi 5-6 cm. Vzdálenost mezi koncem punčochy a stříhem by měla být přibližně stejná jako délka stanovená v kroku 1.
3. Přetáhněte punčochu přes hlavu psa a protáhněte nepoškozenou nohu skrz provedený stříh. Punčocha by nyní měla pokrývat oblast od spodní části krku až po zadní nohy (viz obrázek 2). Dbejte na to, aby se netvořily žádné záhyby!
4. Ochranný pásek proti proříznutí umístěte podél páteře od základu krku až po kyčel. Dbejte na to, aby boční okraje ochrany proti proříznutí směřovaly nahoru.
5. Nyní si nasadte gumové rukavice. Ty zabraňují přilepení fixačního obvazu k vašim rukám.
6. Váš pomocník nebo pomocníci musí nyní držet vašeho psa. Je důležité, aby pes stál vzpřímeně, hlavou dopředu a choval se po celou dobu otisku co nejkldněji. Čím více se pes během otisku pohybuje, tím je otisk méně přesný.
7. **Otevřete vždy pouze jeden fixační ob vaz!** Ponořte ob vaz do připravené misky asi na tři sekundy. Otočte a stlačte materiál tak, aby váleček obvazu absorboval dostatek vody. Po vyjmutí materiálu z vody, postup namočení opakujte ještě jednou. Pro rychlejší tuhnutí fixace by neměla z obvazu kapat voda během aplikace.
8. Nyní materiál oviňte do tří až čtyřvrstvé vrstvy kolem místa pokrytého punčochou. Dbejte na to, abyste fixačním obvazem dostatečně vytvarovali oblast v oblasti krku a na straně hrudníku.
9. Otisk ztvdne během 3-5 minut. Během této doby materiál vyhladte, aby byly všechny kontury dobře viditelné. Dbejte také na to, aby se materiál nedostal do kontaktu se srstí psa, jinak se přilepí.
10. Použijte bezpečnostní nůž a prořízněte otisk na ochraně proti proříznutí. Případně můžete použít i běžné nůžky, které obvykle snadněji přestříhnou materiál v silnějších místech.
11. Poté ochranu proti proříznutí opatrně vytáhněte. Poté nůžkami přestříhnete punčochu v linii předchozího stříhu. Otisk a punčochovou pleteninu odstraníte tak, že je mírně ohnete od sebe a stáhnete směrem dolů.
12. **Prosím, neostraňujte punčochu z otisku.** Otisk podél řezu uzavřete lepicí páskou.
13. Před zabalením a odesláním by měl otisk vytvrdnout asi 24 hodin. Za tímto účelem umístěte otisk ve svislé poloze na suché a teplé místo.
14. Nyní prosím **vyplňte informace o svém psovi** a věnujte pozornost **informacím o přepravě!**



## Přep ravní informace

1. Otisk prosím zabalte a odešlete **nejdříve 24 hodin** po pořízení otisku.
2. **Otisk** a Registrační **Formulář** s informacemi o vašem mazlíčkovi, veškerý nepoužitý materiál (fixační obvazy, punčochu, bezpečnostní nůž atd.) **vložte do krabice**, se kterou jsme vám otiskovací materiály zaslali, a volný prostor vyplňte výplňovým materiálem.
3. **Balík řádně uzavřete a přelepte lepicí páskou, aby nedošlo při přepravě k otevření.**
4. **Na krabici nalepte přepravní štítek. Balík odnese do nejbližší výdejny Zásilkovny.**

<b>Výrobce:</b>		<b>Prodejce ČR:</b>	
Simon Schuß a Dominik Hogen GbR V 1.0 Pater-Alfred-Maier Str. 7 86316 Friedberg Německo	Webová stránka: <a href="http://www.pawsthesis.de">www.pawsthesis.de</a> E-mailem: <a href="mailto:kontakt@pawsthesis.de">kontakt@pawsthesis.de</a> Telefon: +49 821 2674557	WERFFT, spol s.r.o. Kotlářská 53 602 00 Brno Česká republika	Webová stránka: <a href="http://www.eshop.pet2me.eu">www.eshop.pet2me.eu</a> E-mailem: <a href="mailto:eshop.pet2me@werfft.cz">eshop.pet2me@werfft.cz</a> Telefon: +420 541 212 183