



Návod pro sejmutí odlitku pro výrobu ortézy

Obsah sady:

počet ks	název
2	fixační obvaz - Měkká fixace
1	Obvaz hadicový (punčocha)
1	Ochrana proti proříznutí (elastický pásek)
1 set	gumové rukavice
1	nůž
1	přepravní štítek (nalepovací)
1	tento návod

Příprava



Než začnete s odebíráním odlitku přečtěte si pečlivě tento návod a návody obsažené v balení zdravotnických prostředků.

Pro úspěšné odebrání otisku budou potřeba minimálně 2 osoby. Pro zvláště živé psy je výhodou pomoc i třetí osoby.

Vybalte prosím veškerý obsah z odlitkové sady a zkontrolujte úplnost na základě výše uvedeného seznamu. Rozložte na podlahu ručník nebo jinou textilní podložku, která se smí ušpinit, a položte vedle ní veškeré náčiní. Připravte si misku s vlažnou vodou, nůžky a metr.

Zřeknutí se odpovědnosti

Použití této sady a materiálů v ní obsažených je na vaše vlastní riziko. Pokud použijete dodanou sadu, společnost **Pawsthesis** ani **WERFFT, spol s r.o.** nenesou odpovědnost za případné škody a nároky vyplývající z použití odlitkové sady vámi nebo třetími stranami. **Pokud si nejste jisti, jak se sadou zacházet, kontaktujte nás.**



Výrobce:		Prodejce ČR:	
Simon Schuß a Dominik Hogen GbR V 1.0 Pater-Alfred-Maier Str. 7 86316 Friedberg Německo	Webová stránka: www.pawsthesis.de E-mailem: kontakt@pawsthesis.de Telefon: +49 821 2674557	WERFFT, spol s r.o. Kotlářská 53 602 00 Brno Česká republika	Webová stránka: www.eshop.pet2me.eu E-mailem: eshop.pet2me@werfft.cz Telefon: +420 541 212 183

Sejmutí otisku

1. Ochranu proti proříznutí umístěte na vnější stranu punčochy. Ta později slouží jako řezná dráha a ochrana psa. Ujistěte se, že boční hranice ochrany proti proříznutí směřují ven.
2. Nyní si nasadte gumové rukavice. Ty zabrání přilepení fixačního obvazu k vašim rukám.
3. Přetáhněte punčochovou pleteninu přes nohu. Punčochová pletenina by nyní měla být velkoryse a zcela obepínat postiženou oblast a držet ochranu proti pořezání na místě. Pro výrobu orézy je nutné, aby otisk obsahoval také oblasti nad a pod postiženou oblastí. Dbejte na to, aby se netvořily žádné záhyby!
4. Pes by měl při otisku stát, aby byla zajištěna optimální poloha končetiny. Postižená končetina by měla být v co nejpřirozenější poloze. Vaši pomocníci by nyní měli psa udržovat v klidu. Čím více se bude pes pohybovat během otisku, tím méně přesný bude otisk.
5. **Otevřete vždy pouze jeden fixační obvaz!** Ponořte obvaz do připravené misky asi na tři sekundy. Otočte a stlačte materiál tak, aby váleček obvazu absorboval dostatek vody. Po vyjmutí materiálu z vody, postup namočení opakujte ještě jednou. Pro rychlejší tuhnutí fixace by neměla z obvazu kapat voda během aplikace.
6. Nyní materiál oviňte do tří až čtyřvrstvé vrstvy kolem místa pokrytého punčochou. Ujistěte se, že oblast, která má být později podepřena ortézou, je dostatečně zobrazena. Doporučuje se začít na horním konci otiskovací plochy.
7. Otisk ztvdne během 3-5 minut. Během této doby materiál vyhladte, aby byly všechny kontury dobře viditelné. Dbejte také na to, aby se materiál nedostal do kontaktu se srstí psa, jinak se přilepí.
8. Nakreslete perem (např. permanentním fixem) čáru od spodu k hornímu okraji otisku podél přední části otisku (směr pohledu psa) a další vodorovnou čáru na úrovni každého uzavřeného kloubu (např. karpálního kloubu/kolene). Otisky označte také polohou otisku (zadní pravá = BR, přední levá = FL).
9. Použijte bezpečnostní nůž a prořízněte otisk na ochraně proti proříznutí. Případně můžete použít i běžné nůžky, které obvykle snadněji přestřihnou materiál v silnějších místech.
10. Poté ochranu proti proříznutí opatrně vytáhněte. Otisk a punčochovou pleteninu odstraníte tak, že je mírně ohnete od sebe a stáhnete směrem dolů.
11. **Prosím, neostraňujte punčošku z otisku.** Otisk podél řezu uzavřete lepicí páskou.
12. Před zabalením a odesláním by měl otisk vytvrdnout asi 24 hodin. Za tímto účelem umístěte otisk ve svislé poloze na suché a teplé místo.
13. Nyní prosím **vyplňte informace o svém psovi** a věnujte pozornost **informacím o přepravě!**

Přepravní informace

1. Otisk prosím zabalte a odešlete **nejdříve 24 hodin** po pořízení otisku.
2. **Otisk** a Registrační **Formulář** s informacemi o vašem mazlíčkovi, veškerý nepoužitý materiál (fixační obvazy, punčochu, bezpečnostní nůž atd.) **vložte do krabice**, se kterou jsme vám otiskovací materiály zaslali, a volný prostor vyplňte výplňovým materiálem.
3. **Balík řádně uzavřete a přelepte lepicí páskou, aby nedošlo při přepravě k otevření.**
4. **Na krabici nalepte přepravní štítek. Balík odneste do nejbližší výdejny Zásilkovny.**

Výrobce:		Prodejce ČR:	
Simon Schuß a Dominik Hogen GbR V 1.0 Pater-Alfred-Maier Str. 7 86316 Friedberg Německo	Webová stránka: www.pawsthesis.de E-mailem: kontakt@pawsthesis.de Telefon: +49 821 2674557	WERFFT, spol s.r.o. Kotlářská 53 602 00 Brno Česká republika	Webová stránka: www.eshop.pet2me.eu E-mailem: eshop.pet2me@werfft.cz Telefon: +420 541 212 183